

كيفية استخدام اختبار iHealth الذاتي للكشف عن كوفيد-19

يرجى قراءة التعليمات أو مشاهدة الفيديو التعليمي على موقع ihealthlabs.com قبل البدء.

يجب أن تملك هذه الأشياء




أنبوب اختبار به سائل



ماسحة جمع العينة
يمكن العثور على الماسحة داخل العبوة!

الخطوة الأولى: مسح الأنف بالماسحة

حرّك الماسحة دائرياً حول الجزء الداخلي من أنفك (بعمق 2/1 بوصة تقريباً).
5 حركات دائرية في كل فتحة أنف.

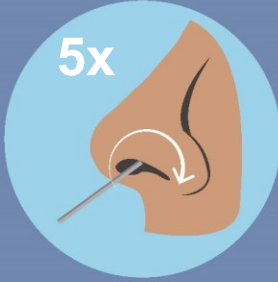

أخرج الماسحة من العبوة وامسكها من الطرف الآخر المقابل للجزء الدائري.




الخطوة الثانية: مزج العينة



أخرج الماسحة من السائل مع الضغط جيداً على الأنبوب. ثم أعد الغطاء البرتقالي إلى مكانه.



اغمس الماسحة في السائل. حركها دائرياً 15 مرة.

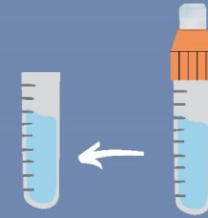

أزل الغطاء البرتقالي من الأنبوب.

الخطوة الرابعة: النتائج



*قد تبدو الخطوط باهتة

ظهور خطين يعني الإصابة بكوفيد.



ظهور خط واحد فوق "C" يعني عدم الإصابة بكوفيد.



عدم ظهور أي خط أو ظهور خط واحد فوق "T" يعني أن الاختبار غير صالح.



الخطوة الثالثة: اختبار العينة

انتظر 15 دقيقة.



اضغط الأنبوب لوضع الشفاف الموجود أعلى الغطاء البرتقالي.



أزل الغطاء الشفاف الموجود أعلى الغطاء البرتقالي.



إذا راودتك أي أسئلة، فيرجى زيارة cv.nmhealth.org/selftest أو الاتصال بالخط الساخن لفيروس كورونا: 1-855-600-3453

