

چگونه از خودآزمای کووید-19 iHealth استفاده کنید

لطفاً دستورالعمل را بخوانید یا قبل از شروع ویدئو آموزشی را در ihealthlabs.com ببینید.

باید این موارد را داشته باشید



لوله
تست با
مایع

گوش پاک کن جمع آوری نمونه



گوش پاک کن در داخل بسته
یافت می شود!

گام اول: بینی خود را با گوش پاک کن پاک کنید

گوش پاک کن را داخل
بینی تان حرکت دهید
(تقریباً 2/1 اینچ داخل).
5 دور در هر سوراخ بینی.



گوش پاک کن را از بسته خارج
کرده و از طرف دیگر سمت گرد
آن را بگیرید.




گام دوم: نمونه را ترکیب کنید



گوش پاک کن را در
حالی که لوله را فشار
می دهید از مایع در
بیاورید. سپس درپوش
نارنجی را دوباره ببندید.




گوش پاک کن را
داخل مایع
بگذارید. تقریباً
15 بار آن را
مخلوط کنید.

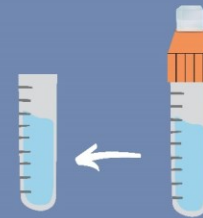


درپوش نارنجی
را از لوله
بردارید.

گام چهارم: نتیجه

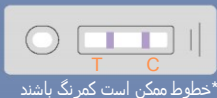

دو خط به معنی نتیجه مثبت
کووید می باشد.

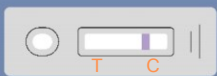

یک خط روی «C» به معنی
نتیجه منفی کووید می باشد.



بدون خط یا تنها یک خط روی
«T» به معنی معتبر نبودن
تست است.



گام سوم: نمونه را تست کنید

15 دقیقه
صبر کنید.



3 قطره روی دایره
گرد کارت تست
بچکانید.



پوشش شفاف
روی درپوش
نارنجی را
بردارید.



در صورتی که هر گونه سوالی دارید، لطفاً از cv.nmhealth.org/selftest
دیدن کرده یا با نمبر تلفون کروناویروس به تماس شوید: 1-855-600-3453