


iHealth 新型コロナウイルス感染セルフテストキットの使用法

使用前に、取扱説明書をお読みになるか、ihealthlabs.com の説明ビデオをご覧ください。

必要となるもの

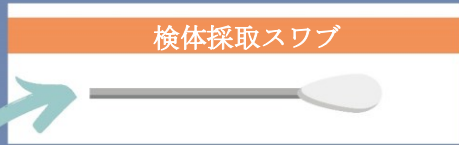


スワブはパッケージに含まれています！


液体入り試験管



手順 1：スワブで鼻腔を拭く

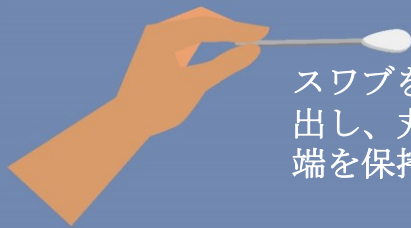

スワブをパッケージから取り出し、丸い部分とは反対側の端を保持します。

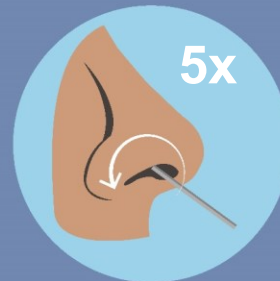

鼻腔に沿ってスワブを動かしてください(深さ約 1/2 インチ)。各鼻腔で **5 回** 回転回してください。

手順 2：サンプルを混ぜる

試験管のオレンジ色のキャップを取り外します。



スワブを液体に浸します。**15 回** かき混ぜます。



チューブを保持し、液体からスワブを取り出します。次に、オレンジ色のキャップを再度取り付けます。



手順 3：サンプルをテストする

オレンジ色のキャップの透明のカバーを取り外します。

テスト液を **3 滴** テストカードの丸い円の上に落とします。

15 分 間待ちます。



手順 4：結果

2 本の線が見えれば、**結果は陽性**となります。



*線はかすれる場合もあります

線が「C」のみに見える場合は、**結果は陰性**となります。



線がまったく見えない、または「T」のみに見える場合は、テストは**無効**となります。



ご不明な点がございましたら、cv.nmhealth.org/selftest にアクセスしていただくか、新型コロナウイルスホットラインまでご連絡ください。 **1-855-600-3453**

