


iHealth 코로나19 자가 검사 키트 사용 방법

시작하기 전에, 사용 설명서를 읽거나 ihealthlabs.com에서 교육 비디오를 시청하십시오.

필요한 품목

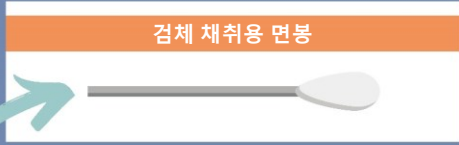


면봉은 제품에 포함되어 있습니다!

용액이 들어 있는 검사 튜브



1단계: 면봉으로 콧구멍에서 검체 채취

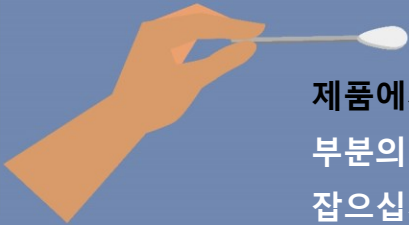


제품에서 면봉을 꺼내 등근 부분의 반대쪽 끝부분을 잡으십시오.



면봉을 콧구멍 안쪽(약 1/2인치 깊이)까지 넣어 움직이십시오. 콧구멍당 5회씩 원을 그리며 문질러줍니다.

2단계: 검체 혼합


튜브의 주황색 뚜껑을 분리하십시오.

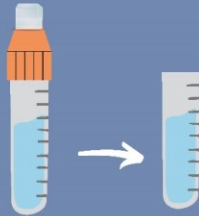

면봉을 용액에 담그십시오. 약 15회 저으십시오.



튜브를 짜면서 용액에서 면봉을 꺼내십시오. 그런 다음, 주황색 뚜껑을 다시 닫으십시오.

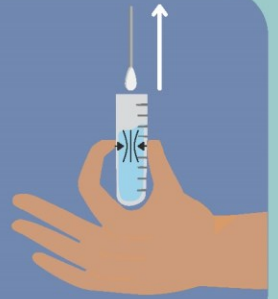

3단계: 검체 검사

주황색 뚜껑의 투명 커버를 분리하십시오.

검사 카드의 동그란 원에 3방울을 떨어뜨립니다.

15분간 기다리십시오.




4단계: 결과 확인

선이 두 개가 나타나는 경우, 이는 **코로나19 양성**을 의미합니다.



*선이 희미하게 나타날 수 있습니다. "C"에만 하나의 선이 나타나는 경우, 이는 **코로나19 음성**을 의미합니다.

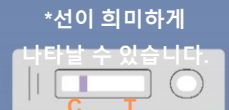

선이 나타나지 않거나 "T"에만 선이 나타나는 경우, 해당 검사 결과는 **유효하지 않습니다**.



궁금한 점이 있는 경우 cv.nmhealth.org/selftest를 방문하거나 코로나바이러스 핫라인(1-855-600-3453)으로 문의하십시오.

