

Cách sử dụng iHealth COVID-19 Self-Test

Vui lòng đọc hướng dẫn hoặc xem video hướng dẫn trên ihealthlabs.com trước khi bắt đầu.

QUÝ VỊ CẦN CÓ NHỮNG DỤNG CỤ NÀY

Tăm bông lấy mẫu

Tăm bông có sẵn trong túi!

Ống nhựa đựng dung dịch đậm




iHealth


Khay thử COVID-19



BƯỚC MỘT: NGOÁY MŨI

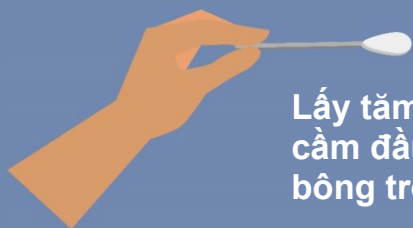

Lấy tăm bông ra khỏi túi và cầm đầu đối diện với phần bông tròn.

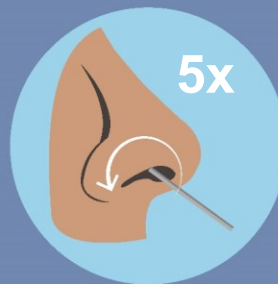

Đưa tăm bông vào ngoáy xung quanh bên trong mũi (sâu khoảng 1/2 inch).
mỗi lỗ mũi 5 vòng.

BƯỚC HAI: TRỘN MẪU

Tháo nắp màu cam ra khỏi ống.



Bỏ tăm bông vào dung dịch. Khuấy đều **15 lần.**



Bóp ống và lấy tăm bông ra khỏi chất lỏng. Rồi đậy nắp màu cam lại.



BƯỚC BA: XÉT NGHIỆM MẪU

Bỏ lớp phủ trong suốt trên nắp màu cam.

Nhỏ **3 giọt** vào vòng tròn trên khay thử.

Chờ 15 phút.



BƯỚC BỐN: KẾT QUẢ

Nếu hiện hai vạch là **dương tính** với COVID.



*Vạch có thể hiện mờ

Chỉ hiện một vạch ở "C" là **âm tính** với COVID.



Không có vạch nào hoặc chỉ hiện vạch ở "T" là kết quả **không có giá trị.**



Mọi thắc mắc, vui lòng truy cập vào cv.nmhealth.org/selftest hoặc gọi đến Đường dây nóng Coronavirus: **1-855-600-3453**

